

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Maria Nelson, (marhe116), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2023-02-03

Giltig till: 2025-01-27

Diskdesinfektor – Checklista för dagligt underhåll

Diskdesinfektorns serienummer

Avdelning

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Dagligt underhåll omfattar kontroll av...

- ... att diskarmarna kan rotera
- ... att spolhålen på diskarmarna är rena på över- och undersida
- ... att rimlig mängd disk- och eventuellt torkmedel gått åt (sätt streck på dunken)
- ... att inga föremål fallit ner på botten
- ... att grovsilen är fri från skräp – tag ut vid behov och rensa den

Rengöringskontroll – Kontrollera att godset är rent efter varje körning.

(Checklistan sorteras in under flik 4 i loggbok för diskdesinfektor)

Bilaga till riktlinje ”Disk- och spoldesinfektorer – Loggbok”

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankett, övrig

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Maria Nelson, (marhe116), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-395

Version: 6.0

Giltig från: 2023-02-03

Giltig till: 2025-01-27