

Disk- och spoldesinfektorer - Loggbok

Sammanfattning

Inom sjukvård används disk- och spoldesinfektorer för rengöring och värmedesinfektion av sjukvårdsmaterial. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras. I riktlinjen tydliggörs ansvarsfördelningen gällande dokumentation i desinfektionsapparaturens loggbok.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Förändringar sedan föregående version	1
Bakgrund.....	2
Syfte	2
Förutsättningar	2
Ansvar	2
Vårdgivarens (SÄS) ansvar.....	2
Verksamhetschefens ansvar	2
Vårdenhetschefens ansvar.....	2
Personalens ansvar	2
Vårdhygiens ansvar.....	3
Servicegivarens ansvar.....	3
Genomförande	3
Dokumentinformation.....	4
Referensförteckning.....	4

Bilagor

[Diskdesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#)

[Spoldesinfektor - Checklista för dagligt underhåll](#)

[Blankett, Disk-/spoldesinfektor - Felanmälan](#)

Bakgrund

Maskinell rengöring och desinfektion bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial enligt rekommendationer beskrivna i den tekniska rapporten SIS-TR 46:2014. Inom svensk sjukvård används spol- och diskdesinfektorer för detta ändamål. För att säkerställa apparaturens funktion ska underhåll och funktionskontroller utföras och dokumenteras enligt standard SS-EN ISO 15883. Personal som handhar och kontrollerar apparaturen ska ha adekvat utbildning för att kunna genomföra uppgiften.

Syfte

Att tydliggöra ansvarsfördelningen för loggboksdokumentation för disk- och spoldesinfektorer.

Förutsättningar

Ansvar

Vårdgivarens (SÄS) ansvar

- Att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad instrumenthantering.
- Att utrustningen underhålls regelbundet.

Verksamhetschefens ansvar

- Att desinfektionsapparaturen blir funktionskontrollerad regelbundet.
- Att personal blir utbildad i handhavandet av apparaturen. Särskilt viktig är utbildning och information om nyanskaffad utrustning.
- Att kontinuerligt tillse att berörd personal har den kompetens som krävs.

Vårdenhetschefens ansvar

- Att den personal som handhar disk- eller spoldesinfektorer har genomgått såväl teoretisk som praktisk utbildning.
- Att det finns en loggbok till varje disk- och spoldesinfektor.

Personalens ansvar

- Att dagligen utföra och dokumentera nödvändiga kontroller enligt loggboken.

Vårdhygiens ansvar

- Att tillhandahålla material till loggbok.

Servicegivarens ansvar

- Att dokumentera underhåll, kontroller och eventuella reparationer i loggboken.
- Att följa aktuella serviceavtal.

Genomförande

Loggbok ska finnas till varje disk- och spoldesinfektor. Enligt standarden SS EN ISO 15883 finns krav på att dokumentera följande:

- Valideringsdokumentation till diskdesinfektorer, utfärdad av leverantör.
- Installationsdokument till spoldesinfektorer.
- Instruktionsbok/bruksanvisning.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) och upprepad processkontroll (UPQ) av diskdesinfektor av godkänd tekniker.
- Årligt förebyggande underhåll (FU) av spoldesinfektor av godkänd tekniker.
- Checklista för dagligt underhåll.
- Felanmälningar och reparationer.
- Namn och telefonnummer till ansvariga för underhåll.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Maria Nelson, hygiensjuksköterska, vårdhygien, SÄS

Remissinstanser

Magnus Edman, tekniker, Västfastigheter

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

instrumenthantering, loggbok, diskdesinfektorer, spoldesinfektorer, autoklav, autoklavering

Referensförteckning

1. SIS TR 46:2014, Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg.
2. SS-EN ISO 15883-1:2009 Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder.
3. Desinfektionsapparat. Vårdhandboken.se
www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/desinfektionsapparat/oversikt/
4. SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen). Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion - Spol- och diskdesinfektorer. Svensk Förening för Vårdhygien; 2012.
<https://sfvh.se/soda-utbildningspaket-for-spol-och-diskdesinfektorer>

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Maria Nelson, (marhe116), Hygiensjuksköterska

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-75

Version: 7.0

Giltig från: 2023-01-31

Giltig till: 2025-01-27