

Viktigt säkerhetsmeddelande Permobil CO-pilot

Produkt: Permobil CO-pilot - Produktmärkning med användarinstruktion

FSCA-identifiering: 444:2012/88289

Typ av åtgärd: Applicering av dekal med användarinstruktion

Datum: 25 februari, 2013

Till: Kunder och användare av denna berörda produkt.

Berörda produkter: Vårdarstyrning Co-pilot P+ och R-net

Berörda enheter: Alla



Bakgrund:

Permobil har vid ett flertal tillfällen fått in rapporter där felorsaken angetts som att stolen går av sig själv vid användning av vårdarstyrningen Co-pilot.

Vid undersökning av de rapporterade incidenterna har det visat sig att ett hanterings-fel är mycket vanligt förekommande, belastning av handtaget vid uppstart är vanligt förekommande orsak.

För att undvika nya incidenter har Permobil valt att utöka brukarinformationen genom att ta fram två nya dekaler till den aktuella produkten Co-pilot.

Denna information finns redan i brukarmanualen för produkten men kommer nu också att finnas tillgänglig direkt på produkten.

Åtgärder som skall vidtas:

Tillsammans med detta brev levereras två dekaler som skall sättas fast på Co-Piloten enligt bifogad monteringsinstruktion. Vänligen kontrollera så dekalerna monteras på rätt sätt, läs igenom texten på dekalerna och säkerställ att ni har förstått innehållet, lägg särskild vikt på instruktionen om att man inte skall belasta Co-Piloten under uppstart.

