

# Instruktörs-Brevet



Aktuell information från  
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

## Instruktörs-Brevet februari 2017 - Primärvård

Instruktörsbrev

### Laboriemedicins studiedagar 2017

Glöm inte att anmäla er till våra studiedagar 23 mars eller 4 april!


Du anmäler lättast via intranätet på regionkalendern. Går inte det, så kontakta instruktörerna för anmälan.

### Quantiferon TB Gold


Vid behov beställ från Marknadsplatsen på Bestnr: 112 924 246. QFT Plus, Singel pack kit.

**F-Hb Actim**, OBS! vändningstiden för provtagningsröret är **2 sekunder**.


### Kort bruksanvisning

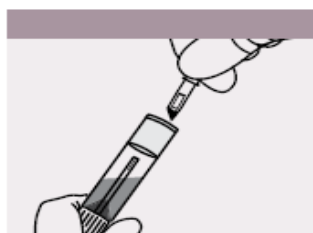

**1** Rumstempera teststickorna samt röret med prov före analys. Blanda provtagningsröret. Tryck provstickans vassa del genom perforeringen i provrörets botten tills det tar stopp.

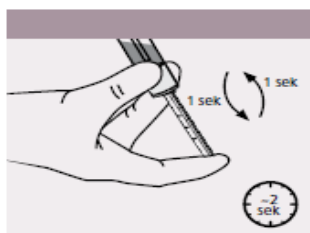


**2** Vänd **sakta** upp och ner på provtagningsröret. Vänd tillbaka provtagningsröret och ställ ner det på arbetsbänken. Hela proceduren ska ta 2 sekunder. Provtagningsröret får bara vändas en gång.

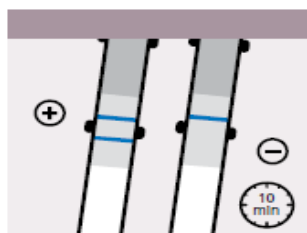


**3** Avlas vid 10 minuter, se **Tolkning av resultat**. Linjer som framträder senare än 10 minuter ska inte tolkas.

### Tolkning av resultat

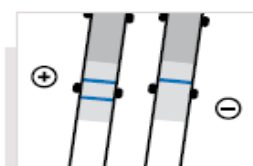

**Positivt resultat**  
Två blå linjer i avläsningsfältet

**Negativt resultat**  
Endast kontrollinjen (den övre linjen) i avläsningsfältet.

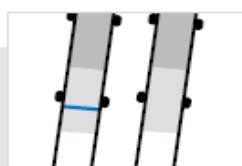

**Ogiltigt resultat**  
Ingen kontrollinje (den övre linjen) ses i avläsningsfältet. Testet ska göras om med en ny teststicka.

*För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.*

**ORION**  
DIAGNOSTICA

### OBS! Transportemballage

Använd transportlåda i papp om ni skickar prover med posten.

Beställs från Marknadsplatsen på Bestnr: 102796364 Storlek (220x170x40 mm)

Använd ej vadderade påsar.

Instruktörerna

Pernilla Jörgensen  
010 – 435 27 13

Elisabeth Galle Österdahl  
010 – 435 27 06

Darinka B Andersson  
010 – 435 30 34