

## Viktig information om tillbehör till Tandem t:slim X2

Vi har fått rapporter om att adaptorn till laddaren till Insulinpump Tandem t:slim X2 kan gå sönder. Vi ser allvarligt på detta och verksamheten har gjort en anmälan till Läkemedelsverket och IVO. Läkemedelsverket inväntar nu svar från tillverkaren. När denna information är tillgänglig kommer samtliga patienter få ett brev med information kring situationen och information om vilka åtgärder som bör vidtas.

På Rubin Medicals hemsida, under nyheter, finns följande information:

"Vi har fått några rapporter om att väggadaptorn vi levererar tillsammans med laddningskabeln till Tandem t:slim X2 har sina svagheter och i några fall **gått sönder**. Om detta händer ber vi dig som användare att reklamera omgående till oss på Rubin Medical, så skickar vi en ny väggadapter till dig. Den nya är av en mer robust konstruktion. Under tiden kan man ladda pumpen med hjälp av USB-uttaget på en dator eller med **de flesta förekommande väggadapterar**.

Alla användare är välkomna att höra av sig så skickar vi en ny oavsett om du skulle ha problem eller inte, maila oss på [info@rubinmedical.se](mailto:info@rubinmedical.se)"

### Vid frågor kontakta:

Ingela Sager  
Produktkonsulent, Diabetes  
Läkemedelsnära produkter  
070 – 020 79 04  
[Ingela.sager@vgregion.se](mailto:Ingela.sager@vgregion.se)