


Snabbguide HemoCue Glukos 201 DM RT

Anvisning Patientnära analysverksamhet

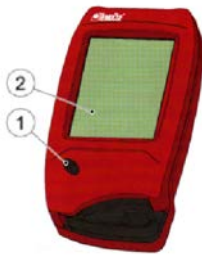


Uppstart av Instrument

- Sätt på instrumentet
- Tryck på knappen På/Av (1)
- Följ instruktionen på skärmen (2)
- Vid uppstart gör instrumentet en självtest som tar ca 20 sekunder



Ange Användar-ID

- Scanna in användar-ID = VGR-ID (streckkod)
- Tryck och håll ner scannersymbolen (1)
- Instrumentet hålls 20-30 cm från streckkodsetiketten (2 och 3)

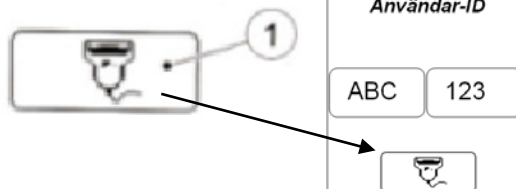


Provtagning

- Patientens hand ska vara varm och avslappnad
- Rengör fingret med desinfektionsmedel
- Gör ett bra stick, torka av de 3 första dropparna



Utförande



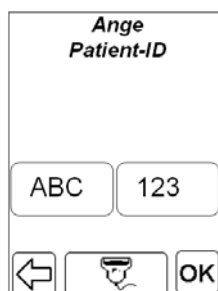



- Tryck fram en stor droppe och fyll kuvetten i ett enda moment. Obs! Efterfyll inte!
- Torka av blodrester på kuvettens utsida
- Lägg kuvetten i hållaren, för in kuvetthållaren i mätläge. Kuvetten ska analyseras inom 40 sekunder



Ange Patient-ID för Rutin-prov

- Tryck på scannersymbolen och scanna in patient-ID
- Kontrollera patient-ID, tryck OK

Analystiden kan variera från 40 sekunder till 240 sekunder innan resultat visas

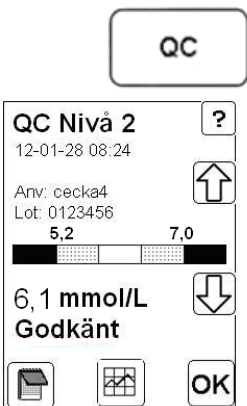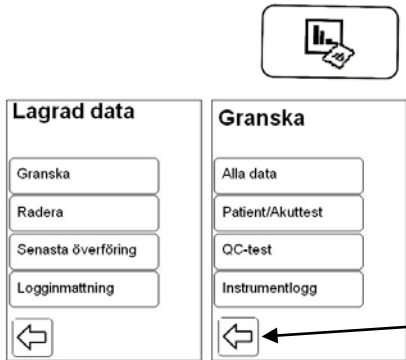	<h3>Patienttest Resultat för P-Glukos</h3> <p>Mätområde: 0 - 31 mmol/L</p> <p>Referensintervall: fkp/fvP-Glukos: 4.2 – 6.3 mmol/L</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på anteckningsboken för att lägga till kommentar Tryck på OK för att lagra provresultat
	<ul style="list-style-type: none"> Logga ut
	<h3>AKUT-prov</h3> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på ambulans symbolen Inget krav på Patient-ID. Tryck OK 2ggr Fyll kuvetten, torka av och lägg i kuvetten För in kuvetthållaren i mätläge
	<h3>Utföra kontroll / QC-test Internkontroll</h3> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på symbolen QC Välj nivå på kontrollen (Level 1= Nivå 1, Level 2 = Nivå 2, Level 3 = Nivå 3) Lägg en droppe kontrollplasma på ett plastat underlag Fyll kuvetten, torka av och lägg den i hållaren Scanna in kontrollens lot-nummer för den nivå som analyseras Resultatet visas. Tryck OK för att lagra resultatet Godkänd kontroll – OK att analysera patientprov Underkänd kontroll – Kör om kontrollen, ev felsök
	<h3>Hämta Patient- eller Kontrollresultat / Lagrad Data</h3> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på symbolen Lagrad data Fel användar-id/lösenord.....Tryck OK! Välj Granska Välj Patient/Akutteest eller QC-test Inget krav på Ange datum Från/Till. Tryck OK 2ggr! Inget krav på Ange Patient-ID. Tryck OK! Bläddra med pilarna, därefter tryck OK! Tillbaka till huvudmenyn
<p>Kvalitetskontroll GlukoTrol ska utföras varje dag som instrumentet används. Alternera mellan två nivåer.</p> <p>Om kontrollen fortfarande inte går in kontakta instruktör på Klinisk kemi</p> <p>Fler detaljerade instruktioner finns i metodbeskrivningen.</p>	