


Snabbguide HemoCue Glukos 201 DM RT

Anvisning Patientnära analysverksamhet

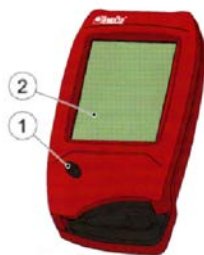


Uppstart av Instrument

- Sätt på instrumentet
- Tryck på knappen På/Av (1)
- Följ instruktionen på skärmen (2)
- Vid uppstart gör instrumentet en självtest som tar ca 20 sekunder




Ange Användar-ID

- Scanna in användar-ID = VGR-ID (streckkod)
- Tryck och håll ner scannersymbolen (1)
- Instrumentet hålls 20-30 cm från streckkodsetiketten (2 och 3)

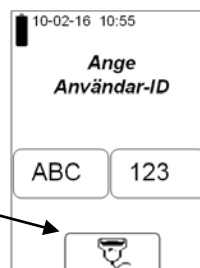


Provtagning

- Patientens hand ska vara varm och avslappnad
- Rengör fingret med desinfektionsmedel
- Gör ett bra stick, torka av de 3 första dropparna

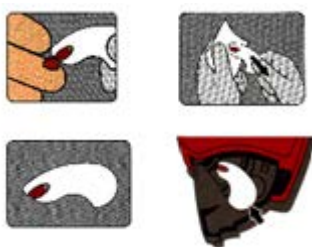

Utförande



- Tryck fram en stor droppe och fyll kuvetten i ett enda moment. Obs! Efterfyll inte!
- Torka av blodrester på kuvettens utsida
- Lägg kuvetten i hållaren, för in kuvetthållaren i mätläge. Kuvetten ska analyseras inom 40 sekunder

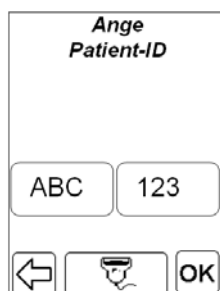

Ange Patient-ID för Rutin-prov

- Tryck på scannersymbolen och scanna in patient-ID
- Kontrollera patient-ID, tryck OK

Analystiden kan variera från 40 sekunder till 240 sekunder innan resultat visas

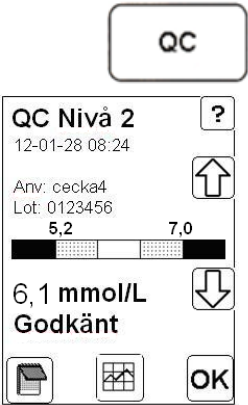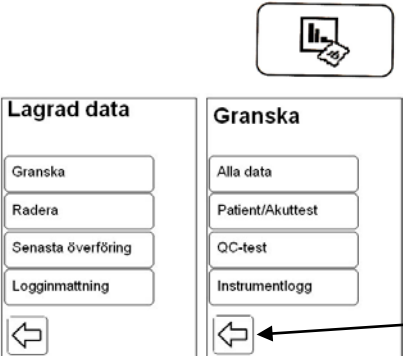	Patienttest Resultat för P-Glukos Mätområde: 0 - 31 mmol/L Referensintervall: fkp/fvP-Glukos: 4.2 – 6.3 mmol/L
	- Tryck på anteckningsboken för att lägga till kommentar - Tryck på OK för att lagra provresultat
	Logga ut
	AKUT-prov - Tryck på ambulans symbolen Inget krav på Patient-ID. Tryck OK 2ggr - Fyll kuvetten, torka av och lägg i kuvetten För in kuvetthållaren i mätläge
	Utföra kontroll / QC-test Internkontroll - Tryck på symbolen QC - Välj nivå på kontrollen (Level 1= Nivå 1, Level 2 = Nivå 2, Level 3 = Nivå 3) - Lägg en droppe kontrollplasma på ett plastat underlag Fyll kuvetten, torka av och lägg den i hållaren - Scanna in kontrollens lot-nummer för den nivå som analyseras - Resultatet visas. Tryck OK för att lagra resultatet - Godkänd kontroll – OK att analysera patientprov - Underkänd kontroll – Kör om kontrollen, ev felsök
	Hämta Patient- eller Kontrollresultat / Lagrad Data - Tryck på symbolen Lagrad data - Fel användar-id/lösenord.....Tryck OK! - Välj Granska - Välj Patient/Akuttest eller QC-test - Inget krav på Ange datum Från/Till. Tryck OK 2ggr! - Inget krav på Ange Patient-ID. Tryck OK! - Bläddra med pilarna, därefter tryck OK! Tillbaka till huvudmenyn
Kvalitetskontroll GlukoTrol ska utföras varje dag som instrumentet används. Alternera mellan två nivåer. Om kontrollen fortfarande inte går in kontakta instruktör på Klinisk kemi Fler detaljerade instruktioner finns i metodbeskrivningen.	