

<i>Dokumentnamn</i> Kompressionshandskar/ärm	<i>Giltigt fr.o.m.</i> 2019-06-01	<i>Reviderat</i>	<i>Version</i> 1	<i>Sida</i> 1 av 3
<i>Framtaget av</i> Sofia Carlsson Hjälpmedelskonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel Catarina Schander Produktkonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel	<i>Godkänt av</i> Jonas Andersson Verksamhetschef hjälpmiddelscentralen			

Kompressionshandskar/ärm

Beställning av kompressionshandske/ärm gör du i webSESAM. Om du saknar behörighet till webSESAM hittar du information och blankett för ansökan

<https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vara-tjanster/webbsesam/>

Välj vilken kompressionshandske/ ärm som du vill beställa. Sök fram beställningsblankett/mätprotokoll för kompressionshandske/ärm på företagets webbplats, [du hittar länkarna till företagets webbplatser här](#).

Det finns tre olika tillvägagångssätt för att beställa kompressionshandske/ärm:

Via leverantörens e-shop

1. Gå in i webSESAM och sök upp samling artikelnummer för den leverantör som du vill beställa från. Gör din beställning i webSESAM.
2. Gå in på leverantörens e-shop och gör din beställning skriv in kundordernumret där leverantören anger.

Bifoga beställningsblankett direkt till din kundorder

Om beställningsunderlaget/mätprotokollet går att spara ner i din dator bifogar du det alltid med beställningen i webSESAM. Se instruktion:

[Beställningsunderlag bifogas i webSESAM](#)

Faxa in din beställning


Gå in i webSESAM och sök upp samlings artikelnummer för den leverantör som du vill beställa från. Gör din beställning i webSESAM. Skriv kundordernumret på beställningsunderlaget/mätprotokollet. Faxa till 010-435 78 00

Dokumentnamn Kompressionshandskar/ärm	Giltigt fr.o.m. 2019-06-01	Reviderat	Version 1	Sida 2 av 3
Framtaget av Sofia Carlsson Hjälpmiddelskonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel Catarina Schander Produktkonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel	Godkänt av Jonas Andersson Verksamhetschef hjälpmiddelscentralen			


Måttagning

Mått för handske och armstrumpa ska tas när aktuell extremitet är som minst svullen. Exakta omfångsmått i mm. Används kompression ska den tas av i anslutning till måttagningen. *För exakt mätning se respektive leverantörs instruktion*

Arm

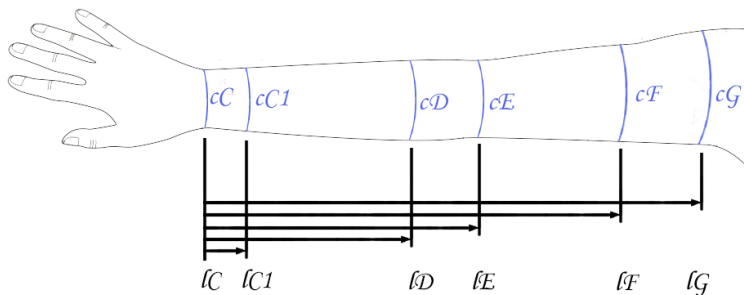

Handske

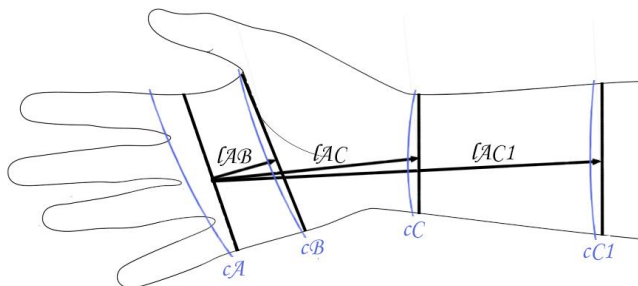

<i>Dokumentnamn</i> Kompressionshandskar/ärm	<i>Giltigt fr.o.m.</i> 2019-06-01	<i>Reviderat</i>	<i>Version</i> 1	<i>Sida</i> 3 av 3
<i>Framtaget av</i> Sofia Carlsson Hjälpmedelskonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel Catarina Schander Produktkonsulent, Medicinska behandlingshjälpmedel	<i>Godkänt av</i> Jonas Andersson Verksamhetschef hjälpmiddelscentralen			

Fingrar

