

Snabbguide

SIEMENS

DCA Vantage™
Analysator

Mikroalbumin/Kreatinin

För kvantitativ mätning av albumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvoten i urin.

STEG

1

Ta ett urinprov

Doppa spetsen på kapillärröret i urinprovet till en nivå precis ovanför stärkelsepluggen.



STEG

2

Rengöra kapillärröret

Torka sidan av kapillärröret med en servett.



STEG

3

Sätta i kapillärhållaren

För in kapillärhållaren i en kassett (platta sidan mot kassetten) tills hållaren låses fast.



STEG

4

Läsa av kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **För in** kassetten i streckodsskåran över pricken.
3. **Skjut** kassetten snabbt och försiktigt nedåt. Ett **pip** och ett förändrat utseende på skärmen innebär en lyckad avläsning. Upprepa om det inte lyckas.



Fortsätter på motstående sida

Snabbguide

SIEMENS

DCA Vantage™

Analysator

Mikroalbumin/Kreatinin

STEG 5

Sätta i kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **Öppna** luckan och **för in** kassetten i facket tills ett klick hörs.
3. **Tryck ned** pistongen i kassetten.
4. **Dra** loss fliken sakta och med fast hand.
5. **Stäng** luckan, så påbörjas analysen.



STEG 6

Registrera Patient ID

1. **Välj** Patient ID
2. **Skriv in** Patient ID
3. **Tryck** på ange
4. **Tryck** på nästa

A screenshot of the HbA1c-test screen on the Siemens DCA Vantage analyzer. The screen is blue and white. At the top, it says "HbA1c-test" and "17:18 2009.11.17". Below that, it says "Patient-ID" and "121212-1212". There is a numeric keypad and an alphanumeric keypad. At the bottom, there are buttons for "Hjälp", "Klar", and "Avbryt".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	'
Z	X	C	V	B	N	M	,	.	
-	-								← CE

STEG 7

Skriva ut resultaten

1. **Vänta** tills testet är slutfört (ungefär 7 minuter).
2. **Skriv ut** resultaten från skärmen.

A screenshot of the A/C Test screen on the Siemens DCA Vantage analyzer. The screen is blue and white. At the top, it says "A/C Test" and "10:45 PM 01/30/2007". Below that, it says "A/C Patient Test Result" and "A/C = 72 mg/g". There are also values for "Albumin = 102 mg/L" and "Creatinine = 141 mg/dL". Below that, there is a list of patient information: "Sequence No: 0123", "Sample ID: ABC123", "Patient ID: MX762092183", "Last Name: HOLLE", "First Name: FRED", and "GFR:". At the bottom, there are buttons for "Help", "Print", "Edit", and "Next".

Sequence No:	0123
Sample ID:	ABC123
Patient ID:	MX762092183
Last Name:	HOLLE
First Name:	FRED
GFR:	

STEG 8

Ta ur kassetten

1. **Tryck ned** knappen på höger sida.
2. Med vänster hand **trycker** du fliken på kassetten till höger så att den låses upp.
3. **Dra** ut kassetten.
4. **Kassera** kassetten för att förhindra skada eller eventuell kontamination.

