

Snabbguide

SIEMENS

DCA Vantage™
Analysator

Hemoglobin A_{1c}

För kvantitativ mätning av
koncentrationen av hemoglobin A_{1c} i blod.

STEG

1

Ta ett blodprov

1. **Doppa** spetsen på kapillärhållaren i en liten droppe blod tills kapillärhållaren är fylld.




STEG

2

Rengöra kapillärörret

1. **Torka** sidan av kapillärörret med en servett.

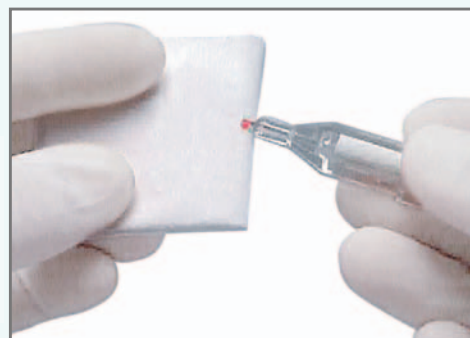

STEG

3

Sätta i kapillärhållaren

- För in** kapillärhållaren i en kassetten (platta sidan mot kassetten) tills hållaren låses fast.



STEG

4

Läsa av kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **För in** kassetten i streckodsskåran över pricken.
3. **Skjut** reagenskassetten snabbt och försiktigt nedåt. Ett **pip** och ett förändrat utseende på skärmen innebär en lyckad avläsning. Upprepa om det inte lyckas.



Fortsätter på motstående sida

Snabbguide

SIEMENS

DCA Vantage™
Analysator

Hemoglobin A_{1c}

STEG 5

Sätta i kassetten


1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **Öppna luckan** och **för in** kassetten i facket tills ett klick hörs.
3. **Dra loss** fliken sakta och med fast hand.
4. **Stäng** luckan, så påbörjas analysen.



STEG 6

Registrera Patient ID


1. **Välj** Patient ID
2. **Skriv in** Patient ID
3. **Tryck** på klar
4. **Tryck** på nästa

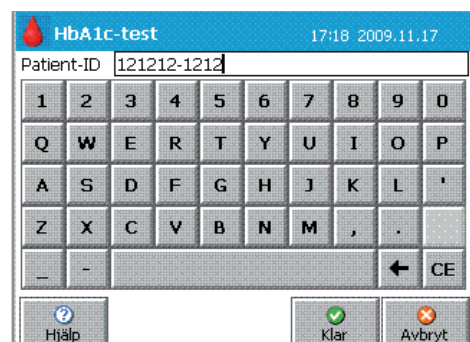

STEG 7

Skriva ut resultaten

1. **Vänta** tills analysen är slutförd (ungefär 6 minuter).
2. **Skriv ut** resultaten från skärmen.

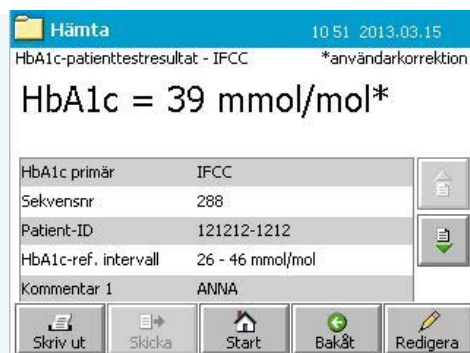

STEG 8

Ta ur kassetten

1. **Tryck ned** knappen på höger sida.
2. Med vänster hand **trycker** du fliken på kassetten till höger så att den låses upp.
3. **Dra ut** kassetten.
4. **Kassera** kassetten för att förhindra skada eller eventuell kontamination.

