

Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen

Rengöring och desinfektion av rektoskop med tillbehör

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en god kvalitet.

Instrument och tillhörande utrustning som kommer i beröring med intakta slemhinnor, utan att penetrera dem, ska vid användning vara minst **högggradigt** rena dvs fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer efter rengöring och desinfektion.

Om slemhinnor ska penetreras exempelvis vid provtagning ska **steril** provtagningsutrustning användas.

Bakgrund

Instrument och tillhörande utrustningen ska tåla rengöring och desinfektion, tillverkarens anvisningar ska följas.

Finns inte möjlighet att uppfylla kraven på rengöring och desinfektion på enheten kan tjänsten eventuellt behöva köpas in från annan enhet till exempel sterilcentral/instrumentcentral.

Förberedelse inför undersökning

Förvaring och hantering ska ske så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.

Ett vattenavvisande engångsfilter ska användas mellan ballongen och rektoskophuvudet.

Rengöring och desinfektion

Rektoskop och tillhörande utrustning för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras mellan varje patient vilket innebär att ta bort organiskt material, som blod och vävnadsrester, samt desinfekteras för att avdöda bakterier, virus och svampsporor.

Desinfektion kan ske med värmedesinfektion eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion i en diskdesinfektor används i första hand om leverantörens rekommendationer tillåter det.

Rengöring och desinfektion

Rektoskoptillbehör som ballong, rektoskophuvud och ljuskabel

- Måste rengöras och desinfekteras mellan varje patient.
- Följ tillverkarens anvisning för rengöring och desinfektion av instrumentet.

Skyddsutrustning

- Följ basala hygienrutiner och använd vid behov skyddsutrustning såsom handskar, engångsplastförkläde och visir.
- Använd skydd vid risk för stänk och skvätt vid rengöring och desinfektion.
- Chef ansvarar för att definiera vilka situationer som innebär ökad risk för smittspridning och verka för att det finns en gemensam bild hos medarbetare för hur och när skyddsutrustning som visir, engångsplastförkläde och skyddshandskar används.



Referenser

- Vårdhandboken. Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet.
- Vårdhandboken. Basala hygienrutiner.
- Förrådshantering för höggradigt rent, fabriksrent och sterilt material
- Produktinformation från leverantören
- Vårdhandboken. Kemisk desinfektion
- Vårdhandboken. Värmedesinfektion