





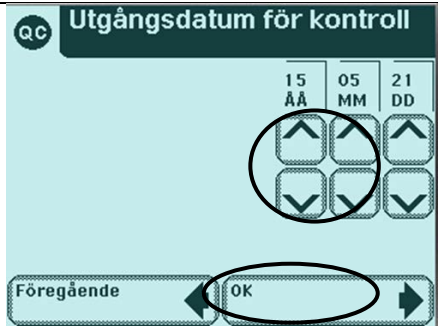


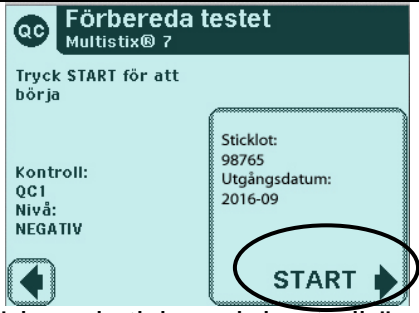



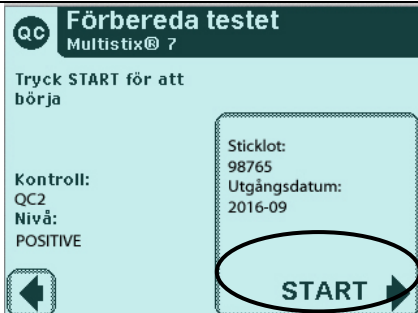
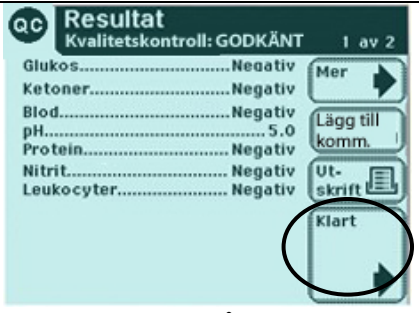



Snabbguide Kontroller Urinsticka - Clinitek Status+

Anvisning Patientnära analysverksamhet

<p>Ta fram kontrollprovvrören 1 och 2, låt bli rumstempererade (15 minuter) Blanda/vänd rören i minst 3 minuter (använd vagg)</p>			
1	 <p>Tryck på "Kvalitetskontroll QC"</p>	2	 <p>Tryck på "Kontroll av sticka"</p>
3	 <p>Tryck på "Ange nytt användarnamn" (alt. Tryck på "Senaste användare")</p>	4	 <p>Skanna VGR-id och tryck "OK"</p>
5	 <p>Tryck på "Ange lot och utgångsdatum"</p>	6	 <p>Skanna lotnr streckkoden från Kontrollrör 1, tryck "OK"</p>
7	 <p>Ställ in utgångsdatum, tryck pilarna upp eller ner under år och månad, lämna dag, tryck OK</p>	8	 <p>Tryck på "Ange ny lot och utgångsdatum"</p>

9	 <p>Skanna lotnr streckkoden på Multistix 7 burken. Tryck "OK"</p>	10	 <p>Förbered sticka och kontrollrör 1. Tryck "START". Doppa stickan, dra längst kanten, läska av.</p>
11	 <p>Skriv resultaten på listan. Ta bort stickan, torka släden. Tryck på "Klart"</p>	12	 <p>Tryck på "Ange lot och utgångsdatum"</p>
13	<p>Upprepa steg 6 och 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skanna lotnr streckkoden från Kontrollrör 2, tryck "OK" - Ställ in utgångsdatum, tryck pilarna upp eller ner under år och månad, lämna dag, tryck OK 	14	 <p>Tryck på "Använd senaste Lot" Förbered sticka och kontrollrör 2.</p>
15	 <p>Tryck "START". Doppa stickan, dra längst kanten, läska av.</p>	16	 <p>Skriv resultaten på listan. Ta bort stickan, torka släden. Tryck på "Klart"</p>
17	 <p>Tryck på "Klart"</p>	18	<p>Ställ tillbaka kontrollerna i kylan.</p> <p>Felsökning: kontrollera kontrollerna och stickorna. Vid behov kontakta laboratorieinstruktör.</p>