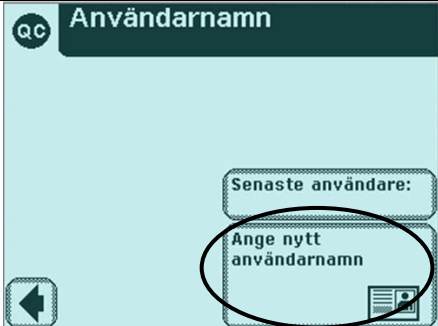
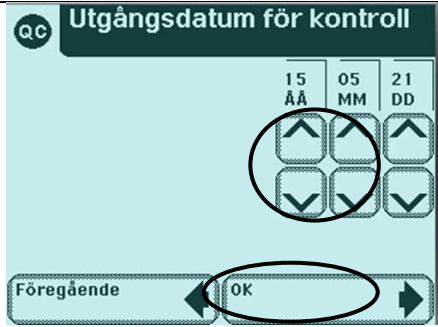
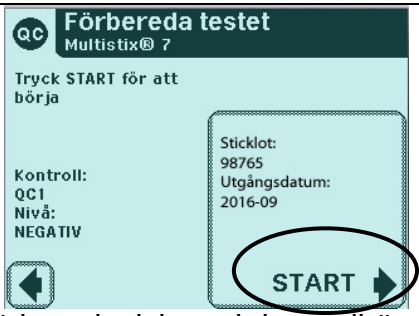
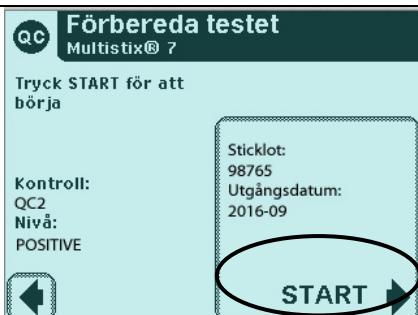
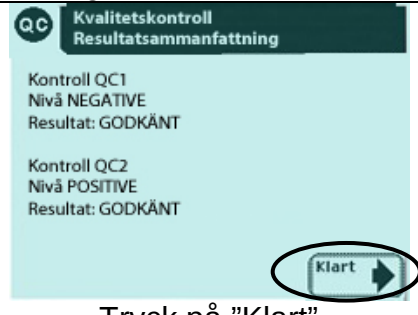


Snabbguide Kontroller Urinsticka - Clinitek Status+

Anvisning Patientnära analysverksamhet

Ta fram kontrollprovvrören 1 och 2, låt bli rumstempererade (15 minuter) Blanda/vänd rören i minst 3 minuter (använd vagga)	
1	 Tryck på "Kvalitetskontroll QC"
2	 Tryck på "Kontroll av sticka"
3	 Tryck på "Ange nytt användarnamn" (alt. Tryck på "Senaste användare")
4	 Skanna VGR-id och tryck "OK"
5	 Tryck på "Ange lot och utgångsdatum"
6	 Skanna lotnr streckkoden från Kontrollrör 1, tryck "OK"
7	 Ställ in utgångsdatum, tryck pilarna upp eller ner under år och månad, lämna dag, tryck OK
8	 Tryck på "Ange ny lot och utgångsdatum"

9	 Skanna lotnr streckkoden på Multistix 7 burken. Tryck "OK"	10	 Förbered sticka och kontrollrör 1. Tryck "START". Doppa stickan, dra längst kanten, läska av.
11	 Skriv resultaten på listan. Ta bort stickan, torka släden. Tryck på "Klart"	12	 Tryck på "Ange lot och utgångsdatum"
13	Upprepa steg 6 och 7 - Skanna lotnr streckkoden från Kontrollrör 2, tryck "OK" - Ställ in utgångsdatum, tryck pilarna upp eller ner under år och månad, lämna dag, tryck OK	14	 Tryck på "Använd senaste Lot" Förbered sticka och kontrollrör 2.
15	 Tryck "START". Doppa stickan, dra längst kanten, läska av.	16	 Skriv resultaten på listan. Ta bort stickan, torka släden. Tryck på "Klart"
17	 Tryck på "Klart"	18	Ställ tillbaka kontrollerna i kylan. Felsökning: kontrollera kontrollerna och stickorna. Vid behov kontakta laboratorieinstruktör.