



Omkörning av kontroller

Om en analysknapp är gul måste du köra om kontrollen.

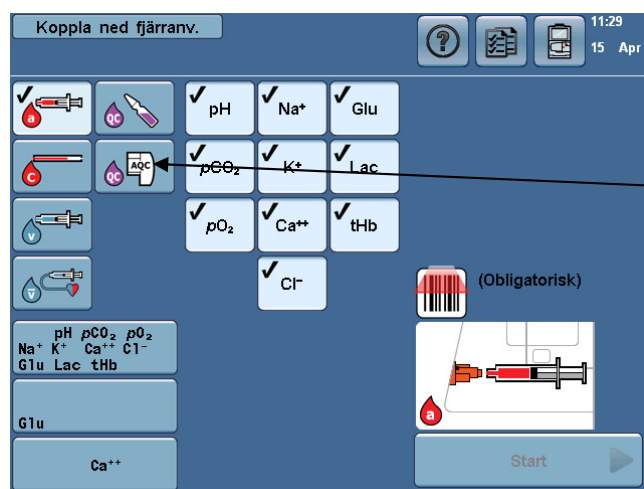

Tryck på AQC

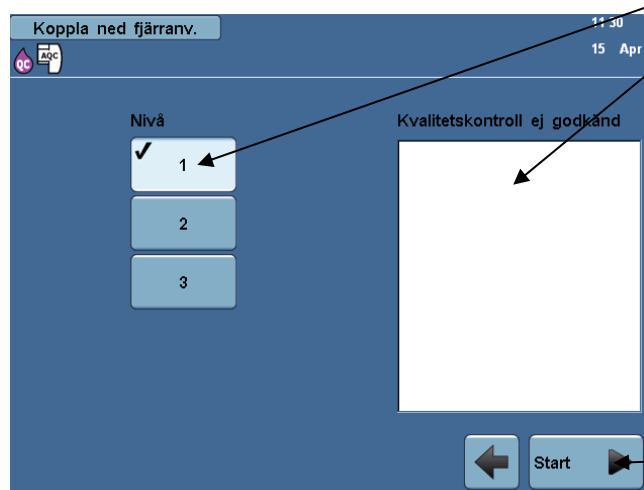

Välj nivå. Det står vilken nivå som är underkänd i den vita rutan.

Tryck på start

Tryck på användar-ID

Analyserar 11:30 15 Apr

QC

Användar-ID

1 2 3
4 5 6
7 8 9
← 0 .
Ta bort

→

Skanna ditt VGR-id i Barcode läsaren

Analyserar 11:31 15 Apr

QC

Användar-ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m , . -
← Ta bort
ABCDEF QWERTY LOCK →

Tryck på pilen

Resultat 11:33 15 Apr

QC

AutomaticQC Nivå 1

pH	7.148		Na ⁺	115.4	mmol/L
pCO ₂	9.50	kPa	K ⁺	3.01	mmol/L
pO ₂	19.69	kPa	Ca ⁺⁺	1.62	mmol/L
			Cl ⁻	80	mmol/L
Glu	11.2	mmol/L	tHb	181	g/L
Lac	11.77	mmol/L	FO ₂ Hb	78.4	%
			FCOHb	2.9	%
			FMetHb	16.0	%
			FHHb	2.7	%

Skicka →

Kontrollera resultatet.
Upprepa vid behov

Tryck på pilen