

# Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från  
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



## InstruktörsBrevet februari 2020 - primärvård

Instruktörsbrev

### Cystatin C

Observera att Cystatin C körs på Li-heparin plasma numera, d.v.s. ett ljusgrönt rör. Analyseras på kem. lab. Sahlgrenska

### Centrifugering av Li-heparin rör

Tänk på att centrifugera de "gröna rören" före transport. Vi har haft några fall av väldigt avvikande Kalium värden(höga) där vi tror att det varit ett preanalytiskt fel. Vi kan se att några av dessa prover inte blivit centrifugerade förrän de kommit till NÄL. Sätter man ett ocentrifugerat Li-heparinrör i kylan, eller på den kylda delen i transportlådan, så kan man få ett högt Kaliumvärde. Dessa rör kan centrifugeras omgående och behöver inte stå så länge som gula och röda serum rör. I de aktuella fallen kallades patienterna till Akutmottagningen samma kväll för ny kontroll av kalium.

### Genetiska prover

Prover som "FISH" till hematologen SU eller **Kromosomanalys** till Klinisk Genetik SU där det står att man kan använda Li-heparin rör, ska man **inte** använda rör med gel och inte heller centrifugera dessa prover. Det är synd när man måste ta om dessa prov. Är det oklarheter kring denna provtagning kontakta laboratoriet som utför analysen eller kundtjänst NÄL.

### Equalis Strep-A

Glöm inte att byta instrument namn på Equalis Strep-A kontroll till **Analyz StrepA Blue Line** så ni kommer i rätt svarsgrupp.

### Studiedagarna 18 mars eller 1 april

Ni glömmer väl inte att anmäla er?

### Användarmöte HemoCue

"Närhälsorna" har fått en separat inbjudan till användarmöte för HemoCue instrumenten, ta tillfället i akt för lite extra utbildning, och glöm inte att anmäla er.

Hälsningar

Pernilla Jörgensen  
010 – 435 27 13

Birgitta Olofsson  
010 – 435 27 26

Darinka B Andersson  
010 – 435 30 34