

# Munskydd – Praktisk hantering

## Regional instruktion

Utarbetad av Vårdhygien i Södra Älvsborg i samarbete med Konscenstab hälso-och sjukvård

Giltighet: 2020-12-16 – 2022-12-16

Ett munskydd måste hanteras korrekt, för att inte innebära risk för smitta för den som använder munskyddet.

Munskydd skall förvaras i sin förpackning tills det skall användas. Munskydd är en engångsprodukt som slängs direkt efter användning. Det skall aldrig flyttas från munnen och sedan tillbaka.

Du kan behålla samma munskydd under förutsättning att munskyddet inte är förorenat, trasigt eller genomfuktat.

### Så här sätter du på munskydd

- Sprita händerna.
- Placera munskyddet över näsa, mun och haka.
- Kläm åt metallskenan över näsryggen.
- Fäst banden runt öron eller bakom huvudet.



### Så här tar du av munskydd

- Sprita händer och underarmar.
- Fatta banden bakom huvud eller öron och lossa dem, utan att vidröra munskyddet. Är det knytband, lossa det nedre först, sedan det övre.
- Lyft munskyddet i banden bort från ansiktet.
- Lägg munskyddet i sopbehållare/papperskorg utan att byta grepp.
- Sprita händer och underarmar.

