

Instruktörs-Brevet

**Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården**



InstruktörsBrevet november 2017 - Primärvård

Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan

Syftet med detta brev är att laboratorieombuden ska sprida information som rör provtagning och provhantering samt patientnära analysarbete (PNA), till berörda kollegor. Vår ambition är att månadsvis sammanställa aktuell information till er från Laboriemedicin, NU-sjukvården

Checklista för ny personal

Bifogar en checklista med instruktörsbrevet som man kan använda sig utav vid upplärning av ny personal vid Närhälsans provtagningar.

Etikett ”skickeprover”

Glöm inte att skriva datum och analys på etiketten för ”skickeprover”. Skulle remissen av någon anledning komma bort, så kan man ha möjlighet att rädda provet om dessa uppgifter finns med på etiketten.

F-Hb immunologisk test

Vi har fått en del samtal om Actim FHbi, om att inte stickan suger upp lösningen ordentligt, och att det kan läcka från burken. Orion Diagnostica, företaget som tillverkar testet, menar att det är viktigt att man vänder burken med stickan exakt så som bruksanvisningen föreskriver.



2 Vänd sakta upp och ner på provtagningsröret. Vänd tillbaka provtagningsröret och ställ ner det på arbetsbänken. Hela proceduren ska ta 2 sekunder. Provtagningsröret får bara vändas en gång.

Instruktörerna
Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Elisabeth Galle Österdahl
010 – 435 27 06
Birgitta Olofsson 010 - 4352726

Darinka B Andersson
010 – 435 30 34