


COVID-19 200522

-  Information om provtagningskit för luftvägar för COVID-19 och odlingsdiagnostik:

Den 20 maj fick ni information från Västra Götalandsregionen via NYHETSBREV COVID-19. Det har tyvärr blivit så att den informationen riktar sig enbart till Sahlgrenska Universitetssjukhus och deras upptagningsområde i VGR. Därför finns det en del felaktigheter i den informationen.

För NU-sjukvårdens upptagningsområde gäller följande:

- **eSwab Transortmedium** blå, vit, rosa och orange kork ska endast användas för den vanliga odlingsdiagnostiken, ex nasopharynxodling, sårodling, svalgodling samt även bakteriell gastroenterit-PCR (tidigare fecesodling), MRSA-screening, ESBL, VRE m m
- För diagnostik av COVID-19 används nasopharynxpinne + 1 ml koksalt i ett "urinodlingsrör" eller liknande tomt rör
- Alternativt kan man använda de s.k [orange provtagningskit](#) som en del vårdcentraler och avdelningar på NÄL och Uddevalla sjukhus fick som ersättningsprodukt när de beställde eSwab transportmedium. **De fungerar för diagnostik för COVID-19** men de fungerar **INTE** för odling. Bakterierna avdödas i vätskan i transportrören.

Analys av COVID-19 på NÄL:

Vi analyserar i första hand prov på patienter på NÄL och Uddevalla Sjukhus
Vi fyller på varje körning med prover på vårdtagare i kommun och hemtjänst, SÄBO m fl
Personalprover (inte SCI LIFE) och antikroppstester analyseras på SU – proverna packas om på NÄL och skickas till SU, dels tidigt varje morgon så de är framme 7.30 och dels går det en transport kl 13 vardagar från NÄL till SU.

SCI LIFE Provtagningskit BIOER: dessa prover analyseras i Stockholm och ska packas i brevkartong märkt UN 3373 samt "COVID-19 Stockholm". Transportpersonal från Regionservice hämtar brevkartongerna på vårdcentralerna och ser till att de skickas till Stockholm.