


Nya produkter

	Sesam art nr	Kommentar
Sondmatningstillbehör		
Uppdragningsrör EN Fit spruta 5cm Nutrifit	34580	Nya artiklar
Uppdragningsrör EN Fit spruta 15cm Nutrifit	34581	
Uppdragningsrör EN Fit spruta Freka	34587	
Korkar EN Fit spruta Freka	34588	
Enteral spruta diskbar EN Fit 60ml Kan rengöras 20 gånger i som mest sju dagar. Rengöringsinstruktioner: se nästa sida samt på Läkemedelsnära produkters hemsida www.regionervice.vgregion.se/lmn	33872	Leverantören har löst sprutans kvalitets- problem.

Produkter som utgår

	Sesam art nr	Kommentar
Komjölksproteinfri modersmjölksersättning		
Nutramigen 1 Lipil	10558	Utgår från leverantör som beräknar att kvarvarande lager kommer att räcka tom slutet av maj
		

ENFit™ Flergångsspruta (DASH 3® Plus)

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER



ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) är osterila efter första användningen och de får inte användas på fler än en patient.



1. Rengör sprutan direkt efter användning. Undvik att låta mat eller medicinrester blir kvar och torka in i sprutan då det förkortar sprutans livslängd.



2. Dra ut hela kolven från hylsan. Det är inte nödvändigt att ta av den svarta gummipackningen från kolven.

3. Tvätta båda delarna (kolv och hylsa) grundligt för hand med varmt vatten och diskmedel (Yes handdiskmedel eller liknande) för att få bort alla eventuella mat eller medicinrester.

4. Skrubba/skrapa **inte** någon del av sprutan, eftersom detta kommer förkorta dess livslängd.

5. Skölj kolv och hylsa noggrant under kallt rinnande kranvatten eller i en skål med rent vatten i.



6. Skaka ur överskottsvatten och låt därefter samtliga delar lufttorka.

7. Torka **inte** delarna med papper, handduk eller liknande, eftersom detta kommer förkorta livslängden på sprutan.

8. Montera ihop kolv och hylsa när de torkat och förvara sprutan på en ren och torr plats. Undvik att förvara sprutan i direkt solljus.



9. Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.

De ska kastas när antingen:

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna.
- Kolven blir trög att använda.
- Sprutan har använts i 7 dagar.

Kontakta sjukvårdspersonal innan användning av ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus).

ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) distribueras av Nutricia.