

Begränsning vid uttag av Enteral flergångsspruta



Artikel	Sesam LMN artikelnummer	Antal stycken per förpackning
Enteral flergångsspruta 60ml	33872	50
Enteral flergångsspruta 20ml	33871	100
Enteral flergångsspruta 10ml	33870	100
Enteral flergångsspruta 5ml	33951	100

Med anledning av Corona-epidemin har det uppstått en brist på dessa sprutor.

Därför kommer antalet sprutor begränsas till maximalt en förpackning per uttag från förskrivningar i Sesam LMN.

Sprutan är godkänd för **att diskas upp till 84 gånger under en period av två veckor.**

Se nästa sida.

Diskinstruktion medföljer leveransen.

Med vänlig hälsning,
Läkemedelsnära produkter



ISO-saf home
Sprutor

Instruktion för rengöring och förvaring.

Läs instruktionen före användning. Vid tveksamhet gällande hantering, kontakta medicinskt utbildad personal.



1. Avlägsna kolven från hylsan. Diska delarna i ljummet vatten med mildt diskmedel. Var särskilt noggrann med att avlägsna alla spår av näringslösning eller medicin från hörnor och trånga utrymmen.



2. Skölj noggrant under kallt rinnande vatten för att avlägsna allt diskmedel. Inspektera delarna för att säkerställa att alla rester av näringslösning eller medicin är borta.



3. Skaka av överflödigt vatten och låt delarna lufttorka. Sätt inte ihop sprutan om den inte är helt torr. Förvara sprutan i en ren behållare med lock.



4. Sprutan kan rengöras upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

Enteral ISO-Saf sprutor ska endast användas av en person. De kan diskas och återanvändas upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

Intorkade rester av näringslösning eller medicin kan vara svåra att få bort vid diskning. Det är därför viktigt att sprutan rengörs omedelbart efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte sprutan om kolven inte rör sig smidigt i hylsan.
- Använd inte sprutan om synlig skada föreligger på kolv eller hylsa.
- Använd inte sprutan om graderingen på hylsan ej går att läsa.

Kontakta ansvarig vårdgivare för uppgifter om lokala föreskrifter gällande hantering av diskbara sprutor.



Administrering av näringslösning/medicin och/eller genomspolning



Gastrisk aspirering och dekompensation

GBUK Enteral Ltd, Woodland House
Blackwood Hall Business Park, North Duffield
Selby, North Yorkshire YO8 5DD

T +44 (0)1757 282 945
E info@gbukenteral.com

ISOSAF™ is a trademark of GBUK Enteral Ltd. GBUK Enteral is a trading name of GBUK Group Ltd. © 2017 Copyright GBUK Ltd.

ISO-saf
JUN2017
ENT-PL07-SV 02