



**Enteral**<sup>UK</sup>  
Part of the GBUK Group

ISOsaf home

Sprutor

# Instruktion för rengöring och förvaring.

Läs instruktionen före användning. Vid tveksamhet gällande hantering, kontakta medicinskt utbildad personal.



**1.** Avlägsna kolven från hylsan. Diska delarna i ljummet vatten med mildt diskmedel. Var särskilt noggrann med att avlägsna alla spår av näringslösning eller medicin från hörnor och trånga utrymmen.



**2.** Skölj noggrant under kallt rinnande vatten för att avlägsna allt diskmedel. Inspektera delarna för att säkerställa att alla rester av näringslösning eller medicin är borta.



**3.** Skaka av överflödigt vatten och låt delarna lufttorka. Sätt inte ihop sprutan om den inte är helt torr. Förvara sprutan i en ren behållare med lock.



**4.** Sprutan kan rengöras upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

## Enteral ISO-Saf sprutor ska

endast användas av en person.

De kan diskas och återanvändas upp till sex gånger per dag i max 14 dagar.

Intorkade rester av näringslösning eller medicin kan vara svåra att få bort vid diskning. Det är därför viktigt att sprutan rengörs omedelbart efter användning.

## Försiktighetsåtgärder:

- Använd inte sprutan om kolven inte rör sig smidigt i hylsan.
- Använd inte sprutan om synlig skada föreligger på kolv eller hylsa.
- Använd inte sprutan om graderingen på hylsan ej går att läsa.

**Kontakta ansvarig vårdgivare för uppgifter om lokala föreskrifter gällande hantering av diskbara sprutor.**



Administrering av näringslösning/medicin och/eller genomspolning



Gastrisk aspirering och dekompression

**GBUK Enteral Ltd**, Woodland House  
Blackwood Hall Business Park, North Duffield  
Selby, North Yorkshire YO8 5DD

T +44 (0)1757 282 945  
E [info@gbukenteral.com](mailto:info@gbukenteral.com)

ISOsaf