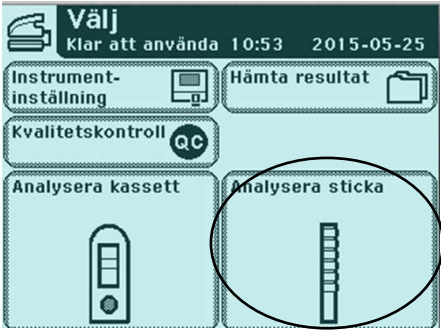
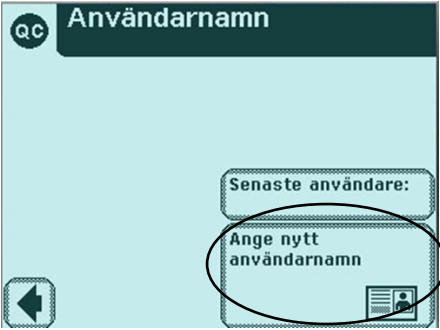



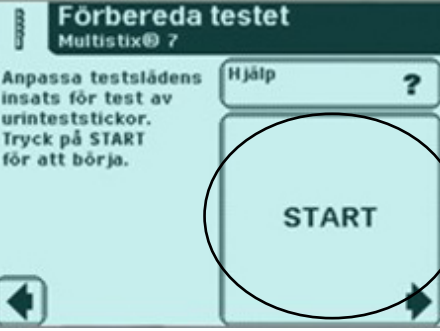

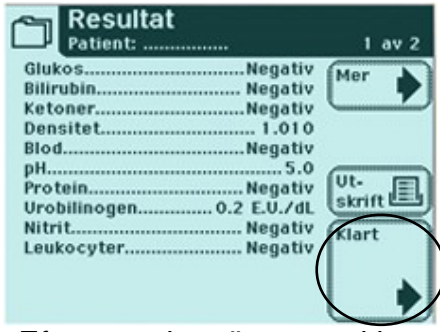


## Snabbguide Urintestremsa Multistix 7 - Clinitek Status+

Anvisning Patientnära analysverksamhet

1	 <p>Tryck på "Analysera sticka"</p>	2	 <p>Tryck på "Ange nytt användarnamn"</p>
3	 <p>Skanna VGR-id och tryck på "OK"</p>	4	 <p>Tryck på "Ange ny patient"</p>
5	 <p>Skanna patient-ID med streckkodsläsaren. Tryck på "OK"</p>	6	 <p>Doppa urinstickan i provet och tryck <u>samtidigt</u> på "START"</p>
7	 <p>Dra stickan mot kanten på muggen/röret för att avlägsna överskottsurin. Läska av långsidan på stickan mot en bit papper. Placera stickan på släden.</p>	8	 <p>Efter en minut är svaret klart och en remsa skrivs ut.</p> <p>Torka av släden. Tryck på "Klart"</p>