

Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon.

Instruktion för desinfektion version 2

Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020–00257) mars 2020 giltig till april 2021

Utarbetad av biträdande regionchefläkare

Syfte

Säkerställa tillgång av stänkskydd – visir/skyddsglasögon.

Förändringar sen föregående version

Tillägg av ”skyddsglasögon” samt förtydligats vilken del av visiret/skyddsglasögonen som ska rengöras.

Bakgrund

I en situation där brist på visir/skyddsglasögon riskerar att ställa personal utan denna skyddsutrustning vid vård av patienter där sådan skyddsutrustning krävs, har arbetsgivaren gjort bedömningen att återanvändning av desinfekterade visir/skyddsglasögon är att föredra framför inget stänkskydd alls. Av detta skäl har denna instruktion för desinfektion av engångsvisir/skyddsglasögon tagits fram.

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir/engångsskyddsglasögon

1. Desinfektera händerna med handsprit.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar (ej skumgummidelen på visir) med ytdesinfektionsmedel med tensid.
4. Häng upp eller placera visiret så det kan torka.
5. Tag av skyddshandskar.
6. Desinfektera händerna med handsprit.

Visiret kan återanvändas så länge sikten genom det är klar.

Innehållsansvariga

Ingemar Qvarfordt

Elisabeth Eriksson Gebring