

# Skötselråd och tvättinstruktioner för flergångsprodukter

---

## Lakansskydd Eldner

Sanicare AB

---



### Bruksanvisning

Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptions-förmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen.

Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

### Tvättråd



Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.

**Antal tvättar (hushållstvätt): ca 450ggr**

---

## Hygienunderlägg Absorba

Sanicare AB

---



### Bruksanvisning

Tvätta hygienunderlägget före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera hygienunderlägget med den ljusblå sidan mot underlaget.

### Tvättråd



Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.

**Antal tvättar (hushållstvätt): ca 200ggr**

---

Sanifix med absorberande gren herr,  
dam, pojke, flicka

Sanicare AB

---

#### Bruksanvisning

Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg. Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptionsförmågan.



Tvättråd



Krympning: <5%

Antal tvättar (hushållstvätt): ca 200gg

---

Fixeringsbyxa MoliCare fixpants short leg  
Hartmann-Scandicare AB

---

Tvättråd



Antal tvättar (hushållstvätt): ca 20ggr



---

Fixeringsbyxa Unifix Light  
Heinex AB


---

Tvättråd



Krympning: Max 10%

Antal tvättar (hushållstvätt): ca 100-150ggr

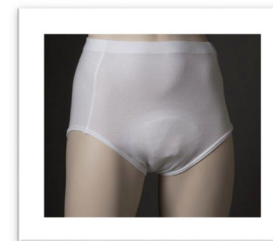

---

Sanifix Comfort med ben  
Sanicare AB

---

Tvättråd



Antal tvättar (hushållstvätt): ca 100ggr



---

## Fixeringsbyxa Sanifix

Sanicare AB

---

### Tvättråd



Krympning: <5%

Antal tvättar (hushållstvätt): ca 25ggr



---

## Urinpåse fixering Netti underben

Hartmann-Scandicare AB

---

### Tvättråd



---

## Fixeringsbyxa TENA Fix Cotton Special

Essity Hygiene and Health AB

---

### Tvättråd

Kan tvättas i 60–95 grader och torkas med skonsam torktumling.

Antal tvättar (hushållstvätt): ca 50ggr



---

## Urinpåse fixering Netti hö

Hartmann-Scandicare AB

---

### Tvättråd



---

Urinpåse fixering Conveen  
Coloplast AB

---

Tvättråd



---

Urinpåse fixering Sanifix  
Sanicare AB

---

Tvättråd



Antal tvättar (hushållstvätt): ca 25ggr



---

Urinpåse fixering Kardborreb  
Sarstedt AB

---

Tvättråd

Kardborren ska vara sluten.



Antal tvättar (hushållstvätt): ca 30ggr



---

Urinflaska  
Hartmann-Scandicare AB

---

Tvättråd

Urinflaskan tål rengöring upp till 100 grader



---

Skyddsbyxa vid bad Netti Combi Aqua  
Hartmann-Scandicare AB

---

**Tvättråd**

Innerbyxa: Max 95 grader

Ytterbyxa: Max 60 grader

Skölj byxorna noga efter bad



# Beskrivning av Tvättsymboler



Tvättas i 30 grader Celsius



Tvättas i 60 grader Celsius



Tvättas i 90 grader Celsius



Tvättas i 95 grader Celsius



Ej kemtvätt



Ej blekmedel



Ej strykning



Stryks på maximalt 150 grader Celsius



Ej sköljmedel



Ej torktumling



Låg temperatur torktumling



Torktumling, normal temperatur