

Viktigt säkerhetsmeddelande

Produkt: Ändfäste Låg (151020) tillhörande Sängbygel REKO från Swereco

Dok. ID: Ändfäste 230212

Säkerhetsåtgärd: Återkallelse på grund av produktionsfel av LOT 230212

2012-04-02


Produkt

Ändfäste Låg art.nr. 151020

Levererade av Swereco Rehab till marknaden mellan datumen 2012-02-23 och 2012-03-20, med LOT nummer 230212. Produkter levererade innan eller efter detta datum berörs ej.

Problem

Ändfästet har svetsats ihop på ett sådant sätt så att det liknar golvstödet. (Se bild som visar rätt respektive fel nedan.) Vid montering föreligger det då risk att sängbygel placeras i ändfästet i stället för i golvstödet. Vid belastning av sängbygel placerad i det felaktiga ändfästet kan fäste och sängbygel lossna från sängen.

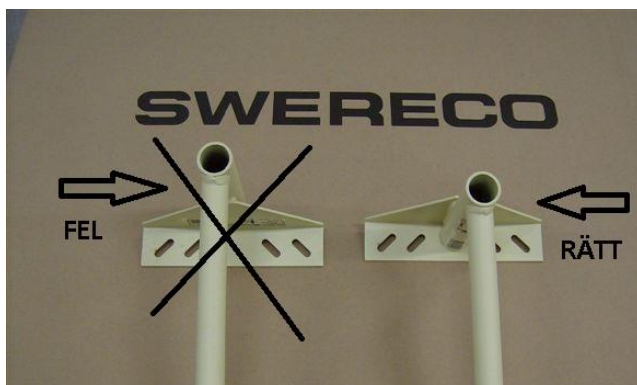

Åtgärd

För att eliminera risken att sängbygel monteras i det felaktiga ändfästet har vi beslutat att återkalla de felaktiga produkterna från marknaden. Detta meddelande kommer att skickas ut till alla kunder vi har identifierat ha fått leverans av den felaktiga produkten. Vi ber kunder och återförsäljare att kontakta oss när produkter från denna batch är identifierade. Ett separat meddelande med instruktioner kommer att skickas till respektive kund. Ny produkt kommer att skickas ut så snart som möjligt efter att återkoppling har skett. De felaktiga ändfästena ska skrotas omgående.

Kommuniceras


Vänligen vidarebefordra till berörda som kan påverkas av denna åtgärd.

Kontaktuppgifter

Cecilia Thurell
Produktansvarig
Swereco Rehab AB
Barnhusgatan 4
111 23 STOCKHOLM

Vi beklagar besväret detta kan medföra och garanterar att vi gör allt för att undvika liknande händelser i fortsättningen.

Undertecknad bekräftar härmed att detta meddelande har rapporterats till berörd regulatorisk myndighet.

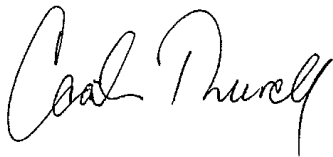

Cecilia Thurell